

## **Sicherheits-/Warnhinweise**

Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile, insbesondere Polyisobutene und Carboxymethylcellulose.

Nicht auf infizierten Wunden anwenden. Wenn Sie Diabetiker sind oder Kreislaufprobleme haben, fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie dieses Produkt anwenden. Sollte die gewünschte Heilung ausbleiben oder die umliegende Haut sich röten und anschwellen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Verwenden Sie das Produkt nur einmal. Die Wiederbenutzung kann zu Kreuzinfektionen führen und die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Nicht zusammen mit Cremes verwenden, da dadurch das Pflaster unter Umständen nicht mehr auf der Wunde haftet und der Behandlungserfolg beeinträchtigt wird. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet/beschädigt ist. Nicht verwenden bei blutenden Wunden/ Verbrennungen dritten Grades.

Das Pflaster sollte so lange wie möglich an der Wunde haften. Tritt Feuchtigkeit aus, sollte es unverzüglich gewechselt werden. Das Pflaster muss ausgewechselt werden, wenn die maximale Absorption erreicht wurde.