

## **Sicherheits-/Warnhinweise**

Das Tape locker aufbringen und darauf achten, dass die Haut nicht abgeschnürt wird. Das Tape alle 3-5 Tage austauschen. Das Kinesiologie Tape nicht auf verletzte Haut oder Wunden anbringen. Testen Sie das Tape an einer kleineren Hautstelle, falls Sie eine empfindliche Haut oder Allergien haben. Bei Hautirritation oder unangenehmen Gefühl, das Tape sofort entfernen und nicht mehr verwenden. Das Tape in Längsrichtung und in Richtung des Haarwuchses entfernen. Ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zu Raten, wenn Sie an schlechter Durchblutung, Diabetes, Arthrose, rheumatoider Arthritis leiden, bei schweren Verletzungen oder wenn Sie schwanger sind. Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse an den Hersteller und an die zuständige Behörde.